



SKG 4098E
Nyak masszírozó

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a SKG terméket választotta!

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Ne használja a készüléket a következő egészségügyi készülékekkel együtt:
 - Beültetett szívritmus-szabályzó vagy egyéb beültethető egészségügyi elektronikai eszköz.
 - Mesterséges szív vagy tüdő vagy egyéb élet-fenntartó egészségügyi elektronikai eszköz.
 - EKG és egyéb egészségügyi elektronikai eszköz.
 - Benzinkutak, magas portartalmú üzemek, gáz és egyéb gyúlékony, robbanásveszélyes területen.
- Ha a felhasználó magas frekvenciájú sebészeti eszközt és a készüléket egyszerre használja a testén, az elektródák égési és egyéb károkat okozhatnak a készülékben.
- Ha a készüléket rövidhullámú mikrohullámú terápiás eszköz közelében (1m) használja, a termék kimenete instabil lehet.
- A kezelés alatt kerülje, hogy az elektródák sebekkel és sérülésekkel érintkezzenek.
- A készülék használata során figyeljen rá, hogy a mellkason ne helyezze a szív közelébe.
- A készülék használata csak egy személy részére javasolt. Ha több személy használja, tisztítsa meg az elektródákat új személy általi használat előtt.
- A készülék használata során az elektródákat szoroson és egyenletesen helyezze a bőrre.
- Az elektródák hőtermelő funkcióval rendelkeznek. Ha a melegítő funkciót hosszú időn át (több, mint 15 perc) használja, az alacsony hőmérsékletű égést okozhat.
- Ha a használat során vagy után kellemetlenül érzi magát, hagyja abba a termék használatát és forduljon egészségügyi szakemberhez.
- Az alábbi esetekben forduljon orvosához a termék használatba vétele előtt, különben balesetet vagy fizikai kényelmetlenséget okozhat:
 - Egészségügyi kezelés alatt álló és kényelmetlen érzéssel rendelkező páciens
 - Rendellenes szív és idegrendszerrel rendelkező páciens
 - 38 fokos testhőmérséklet felett (láz esetén)
 - Fertőző betegség esetén
 - Bőrérzékenység vagy egyéb bőr rendellenesség esetén
 - Gyógyszeres kezelés alatt álló páciens
 - Rendellenes vérnyomás esetén
 - Korlátozott cselekvő képesség esetén
 - A magas perifériás keringési rendellenességek, például cukorbetegség miatt érzékszervi károsodásban szenvedő betegek.
 - Rozsdamentes acél elektródákra allergiás bőrrel rendelkezők.
- Az alábbi esetekben ne használja a készüléket:
 - Rosszindulatú daganat esetén
 - Vérzékenység esetén
 - Állapotos nők, ágynyugalom esetén
 - Akut váladékkal járó gyulladós megbetegedés esetén
 - Szívritmus-szabályzóval rendelkező betegek esetén
 - Fém implantátummal rendelkezők esetén
 - Szív közelében
- Na használja a szív közelében, a nyak felett, fejen, szájon, genitáliákon, bőr rendellenességen, valamint a talpakon egyszerre. Továbbá nem nyomja a belső szerveket a használat során.

- Ne használja együtt más egészségügyi termékkel vagy két terméknel többet egy időben.
- Ne használja sérült vagy repedezett felületen.
- A készülék hőtermelő felülettel rendelkezik. Hőre érzékenyek óvatosan használják.
- A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. pontjának. Nem okoz sérülést okozó interferenciát. Ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve azokat az interferenciákat, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a készülék meghibásodását okozhatják.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek (0°C alatt és 40°C felett), valamint tűző napsugárzásnak.
- Amennyiben a készülék elektromos hálózatra történő csatlakoztatása után azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!
- Tűz-, és balesetveszély elkerülése érdekében ellenőrizze használat előtt, hogy az akkumulátor és a töltő nem sérült-e. Ne használja a készüléket ha a töltő vagy az akkumulátor sérült.
- A készülék nem játék! Gyermekek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett és engedéllyel használhatják! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A készüléket hűvös, száraz helyen tárolja.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati kábelt.
- Védje a hálózati kábelt. Vezesse úgy, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Húzza ki a kábelt a fali aljzatból, amennyiben huzamosabb ideig nem szándékozik használni a készüléket.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Ne használjon semmilyen illatosító anyagot a szűrőn. Az ilyen termékek gyúlékony vegyületeket tartalmazhatnak, amelyek miatt a készülék kigyulladhat.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülékben.
- Huzamosabb használat esetén, vagy folyamatos terhelés mellett a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
- Ne helyezzen tárgyakat a készülék nyílásaiba, ne használja a készüléket bármelyik nyílás eltömődése esetén. Tartsa por, szősz, haj és egyéb tárgyaktól távol, amelyek akadályozhatják a légáramlást.
- Ezt a terméket gyermekek, szellemileg-, vagy fizikailag korlátozott személy nem használhatja. A készülék karbantartását és tisztítását gyermekek nem végezhetik.
- Ne nyúljon a mozgó alkatrészekhez, és tartsa távol a haját és a ruházatát is tőlük.
- A tisztítás vagy karbantartás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és távolítsa el a tápkábelt a konnektorból.
- Kizárólag a készülékhez kapott töltőt használja. Más töltő használata érvényteleníti a jótállást. A töltésre vonatkozó előírásokat szigorúan tartsa be!
- Ne vágja szét, ne javítsa és ne módosítsa a készüléket vagy a tartozékokat.
- Ne érintse meg a töltőt vagy a készülék bármely részét nedves kézzel.
- A készüléket mindig tartsa távol a hőforrásoktól (pl. radiátor, fűtőtest).
- Megfelelően kezelje az akkumulátort – veszélyes hulladéknak számít!
- Ha az akkumulátor nincs használatban, tartsa távol fém tárgyaktól, pl. irattartó kapocs, pénzérme, kulcs, szögek vagy csavarok. Az akkumulátor érintkezőinek összezárása tűz és égés kockázatát rejti.

- Amennyiben a tápkábel, az adapter vagy az akkumulátor megsérül, feltétlenül ki kell azt cserélni. Ne üzemeltesse így a készüléket.
- Sérülékeny feltételek esetén folyadék szivároghat az akkumulátorból. Kerülje az érintkezést, mert bőrirritációt okozhat. Ha ez előfordul, öblítse le vízzel a bőrét. Ha a folyadék szembe kerül, kérjen orvosi segítséget.
- Szállítás előtt ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a készülék. Javasoljuk az eredeti csomagolás megtartását.
- Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket, javasoljuk, hogy legalább 90 naponként töltsen fel teljesen az akkumulátort.
- NE dobja az akkumulátort vagy a készüléket és tartozékokat tűzbe, mert robbanásveszélyes.
- NE merítse vagy dobja az akkumulátort vagy a készüléket és tartozékokat bármilyen vízbe, sós vízbe vagy folyadékba.

Megjegyzések:

- Ha kényelmetlenséget vagy rendellenességet tapasztal a termék használata során, hagyja abba a termék használatát azonnal!
- Ha a testén vagy bőrén furcsa érzést tapasztal, konzultáljon orvosával és kövesse az orvos utasításait.
- Ha készüléket használat közben más személyre helyezi, ellenőrizze, hogy az áthelyezés előtt a készüléket kikapcsolat.
- Ne használja elektronikai eszközök viselése közben.
- Ha rendellenes működést tapasztal, kapcsolja ki a készüléket és vegye le.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza kis az USB kábelt nedves kézzel.
- Ne használja magas páratartalmú helységben (pl. fürdőszoba) vagy fürdés közben.
- Ne használja alvás közben.
- Ne használja hosszú ideig egy területen (több, mint 30 percig).
- Masszázs közben ne érintkezzenek az elektródák övek, nyakláncok, stb. fém felületeivel.
- Viselje megfelelően a készüléket a nyaki gerincen.
- Az USB kábel eltávolításakor ne csak a kábelt húzza, hanem a csatlakozó végénél fogja meg a kábelt.
- Hosszabb idejű használat esetén a felület felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Ha a távvezérlőt hosszabb ideig (3 hónapon túl) nem használja, távolítsa el az elemet.
- Ha az elem lemerült, cserélje újra (CR2032). Az elem behelyezésénél figyeljen a polaritásra.
- Az elhasznált elem kezelésénél figyeljen oda a helyi hulladék-kezelési szabályok betartására.
- Ellenőrizze, hogy a gomb megfelelően működik.
- Első használat előtt, vagy hosszabb használaton kívüli időszak után, töltsen fel az akkumulátort.
- Ha nem használja tovább a terméket figyeljen oda a helyi hulladék-kezelési szabályok betartására.
- Használata 16 éves kor felett javasolt

IMPORTŐR:

WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

Tel.: (+36-1) 445-1222

Email: info@wayteq.eu | Web: wayteq.eu mstore.hu

SKG Manual HU v1.0 - 4. oldal

A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

JELLEMZŐK

Modell:	4098E
Teljesítmény:	5W
Névleges feszültség:	5V
Szabványok:	EN60335-1, EN60335-2-32, EN62233

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

DOBOZ TARTALMA

- SKG 4098 nyak masszírozó
- Távvezérlő
- USB kábel
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

SKG Health Technologies Co., Ltd.

Address: 23A Floor, Building 3, Zhongke R&D Park, No. 009, Gaoxin South 1st Road, High-tech Zone Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.


A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

A gyártó ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel minden direktívának és európai normának.



Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.



© 2024 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

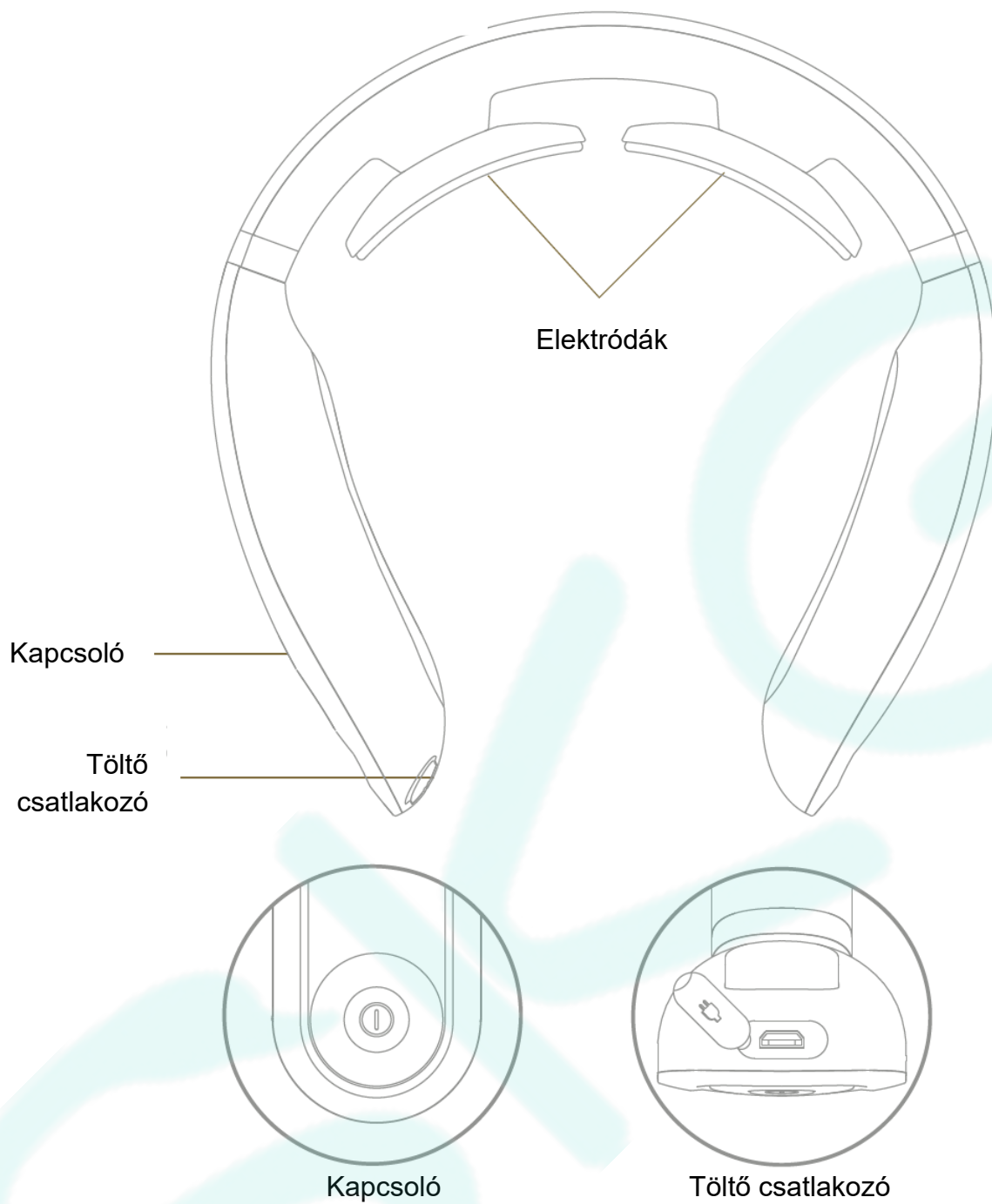

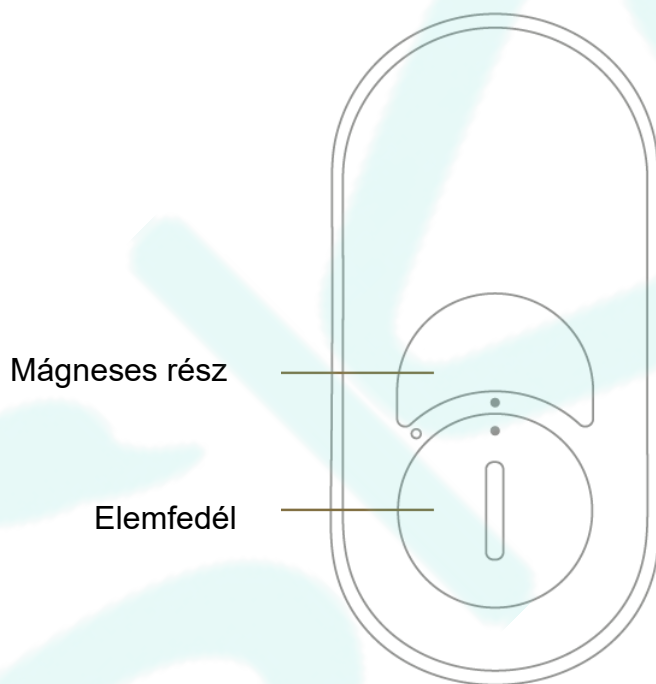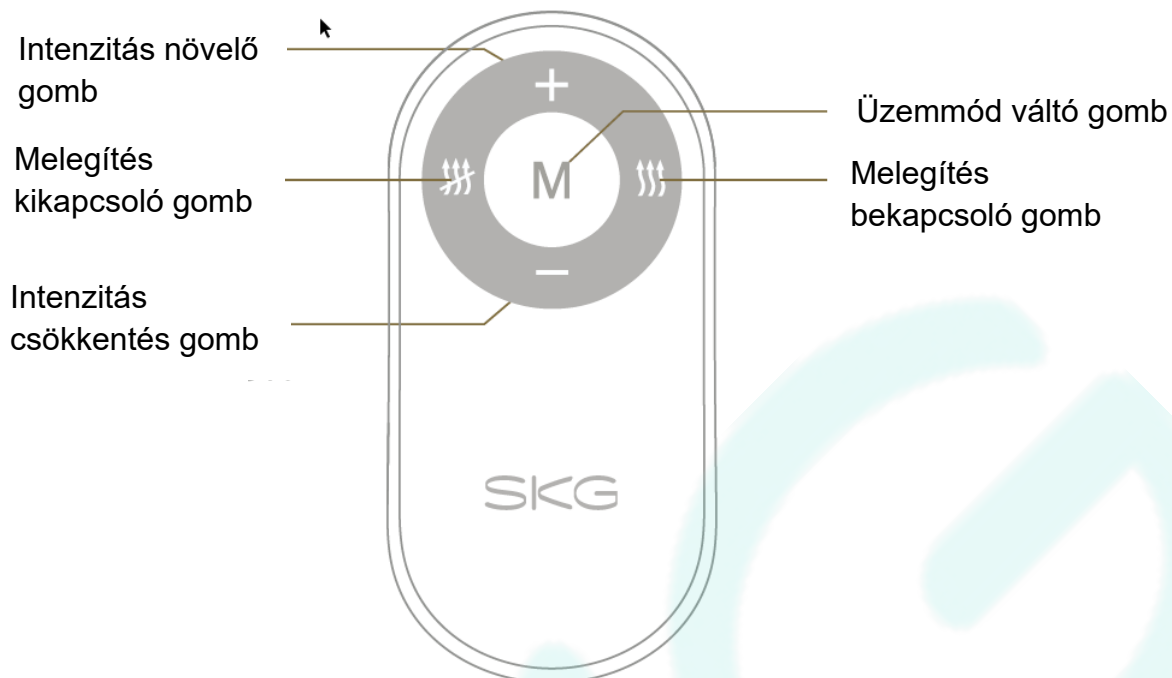



Távvezérlő

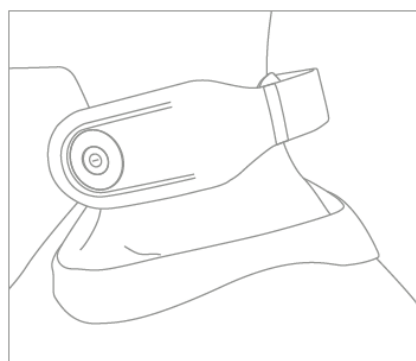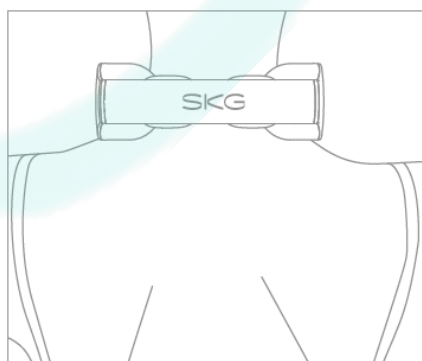

Viselés



HASZNÁLAT

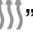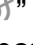1. Első használat előtt nedvesítse be a bőrt egy törölközővel a nyaki gerincnél és helyezze a készüléket a nyak köré. Az elektródák a nyaki gerinc bőrének közelében legyenek. Állítsa be a készülék helyzetét kapcsolja be a készüléket és állítsa be a megfelelő masszázs intenzitást és üzemmódot.
2. Nyomja meg 2 mp-ig a  gombot, kapcsolja be a készüléket (a jelzőfény felvillan és sípoló hang hallható). Nyomja meg a gombot és növelje 1 fokozattal az intenzitást, melyet egy sípoló hang jelez. A 15. fokozatig nyomja meg a gombot, a maximális fokozat elérését két sípoló hang jelzi és az intenzitás nem nő. Nyomja meg 2 mp-ig a  gombot a készülék bekapcsolt állapotában. Két sípoló hang hallható és a készülék kikapcsol.
3. A távvezérlő "M" gombja az üzemmód váltó gomb. Nyomja meg az üzemmód váltáshoz. Három üzemmód választható. Minden megnyomás után egy sípoló hang hallható és a következő módra vált. A három üzemmód ciklikusan váltható (napi mód, relaxáló mód, gyakorló mód). Minden üzemmód váltás után az intenzitás szintje 0-ra vált.
4. A "+" gomb a távvezérlőn növeli az intenzitást. Minden megnyomás után egy sípoló hang hallható és egy fokozattal nő az intenzitás. Az intenzitás 15 fokozatban állítható (0-15). Ha az intenzitás 15. fokozatban van, két sípoló hang hallható a "+" gomb megnyomására és az intenzitás a 15. fokozatnak megfelelő lesz.
5. A "-" gomb a távvezérlőn csökkenti az intenzitást. Minden megnyomás után egy sípoló hang hallható és egy fokozattal csökken az intenzitás. Az intenzitás 15 fokozatban állítható (0-15). Ha az intenzitás 0. fokozatban van, két sípoló hang hallható a "-" gomb megnyomására és az intenzitás a 0. fokozatnak megfelelő lesz.
6. Nyomja 2 mp-ig a "+" gombot a hangjelzés bekapcsolásához. Nyomja 2 mp-ig a "-" gombot a hangjelzés kikapcsolásához.
7. A  gomb a távvezérlőn a melegítés gomb. Nyomja meg a gombot a melegítés bekapcsolásához, ezt egy sípoló hang jelzi. Az elektródák felmelegednek 37~43°C közép.
8. A  gomb a távvezérlőn a melegítés kikapcsoló gomb. Nyomja meg a gombot a melegítés kikapcsolásához, ezt két sípoló hang jelzi.
9. A készülék üzemelése 15 percre van ütemezve. Bekapcsolást követően 15 perccel automatikusan kikapcsol.
10. A készülék bekapcsolása után 30 másodpercen belül kikapcsol, ha a felhelyezés nem megfelelő.

TÖLTÉS

Ha az akkumulátor energiaszintje alacsony, a bekapcsoló gomb narancs színnel világít. Csatlakoztassa a Micro-USB kábel egyik végét a készülékhez, a másik végét pedig USB hálózati adapterhez (5V/1A, 5V/2A, nem tartozék). Töltés közben a narancs fény villogni fog. Ha a töltés befejeződött, a jelzőfény kéken villogni fog.

A távvezérlő elemének cseréjéhez (nem tartozék), használjon egy érmét az elemtartó fedelének kinyitására. Forgassa el az óramutató járásával ellentétesen. Helyezzen be egy CR2032-es elemet. Az elem pozitív pólusának felfelé kell néznie.

MEGJEGYZÉSEK:

- *A készülék 15 perc működés után automatikusan kikapcsol. Nem javasolt a készülék használata naponta 30 percnél hosszabb időtartamon át.*
- *A készüléket tartsa száraz, jól szellőző helyen használat után.*
- *Ne helyezzen nehéz tárgyat a készülékre.*
- *Ne fogja meg a készüléket az USB csatlakozó gumi fedelénél, mert az leszakadhat és a készülék leeshet.*

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A készülék tisztításához és karbantartásához mindig kapcsolja ki a készüléket. Használjon nedves papírtörölt az elektródák tisztításához. Ha kissé bekoszolódik a készülék használjon gyógyszertári alkoholt (75%-os alkohol koncentráttal) a tisztításhoz és fertőtlenítéshez.

Használjon semleges tisztítószer és puha ruhát a napi karbantartás során. Ne használjon maró hatású szert és ne helyezze vízbe a készüléket áztatáshoz vagy mosáshoz.

A tisztítási folyamat során figyeljen rá, hogy ne kerüljön víz vagy egyéb folyadék a készülék belsejébe, mert ez rövidzárlatot és elektromos ütést okozhat és érvényteleníti a garanciát.

HIBAELHÁRÍTÁS

Ha használat során problémát tapasztal, nézze át az alábbi táblázatot.

Ha probléma ez után is fennáll, kapcsolja ki a készüléket.

Ne szerelje szét vagy javítsa meg a készüléket. A készülék szétszerelése károsodást okozhat a készülékben és érvényteleníti a garanciát! Az ebből adód károkért nem vállalunk felelősséget!

Probléma	Lehetséges ok / kezelés
Sikertelen indítás	<ul style="list-style-type: none">Alacsony energiaszint az akkumulátorbanA távvezérlő eleme lemerültEllenőrizze, hogy a készülék bekapcsoló gombja meg lett-e nyomva
Töltési hiba vagy nincs töltés jelzés	Ellenőrizze, hogy az USB kábel és a készülék az adapterhez (nem tartozék) megfelelően van-e csatlakoztatva.
Normál kijelzés, de nincs stimuláció	<ul style="list-style-type: none">Az elektródák közvetlenül érintkeznek a bőrrel? Állítsa be a megfelelő pozíciót, hogy az érintkezés megfelelő legyenVan hajszál, ruha vagy ékszer az elektródák és a bőr között. Helyezzen arrébb vagy távolítson el minden tárgyat.Az intenzitás szintje 0 fokozaton van? Emelje meg az intenzitás szintjét.
Bizsergető érzékelés	<ul style="list-style-type: none">Az elektródák és a nyak bőre közvetlenül érintkeznek? Állítsa be a megfelelő pozíciót.Túl hosszú masszázsi idő? Csak 15 perc használat egyszerre, napi két alkalommal.Túl magas intenzitás? Állítsa alacsonyabb fokozatra.A bőr allergiás reakcióval reagál az elektródákra? Súlyos allergiával rendelkezőknek érzéketlenítés szükséges.A klíma hűvös és a bőr száraz? Használjon egy nedves törölközőt a bőr nedvesítéséhez és ez után használja a készüléketSeb van a bőrön? Ne helyezze az elektródákat sebre masszázshoz.

Gyenge stimuláció	<ul style="list-style-type: none"> • Az elektródák és a nyak bőre közvetlenül érintkeznek? Állítsa be a megfelelő pozíciót. • Az elektródák elszennyeződtek vagy olajosak? Tisztítsa meg az elektródák felületét • Alacsony az akkumulátor energia szintje? Töltse fel az akkumulátort • Az intenzitás túl alacsony? Állítson be magasabb intenzitást.
-------------------	--

HULLADÉK-KEZELÉS

Újhasznosítási tájékoztató


Környezetvédelmi okokból a termék vagy részeinek hulladék-kezelésekor felelős fogyasztóként gondoskodnia kell róla, hogy elkülönülten gyűjtse a háztartási hulladéktól és el kell juttatnia megfelelő hulladék-hasznosító szervezethez, ahol a terméket vagy részeit szétszerelik és a helyi szabályoknak megfelelően kezelik.

Veszélyes anyagok és összetevők

Rész neve	Veszélyes anyag					
	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE
Fém	o	o	o	o	o	o
Panel	x	o	o	o	o	o
Műanyagok	o	o	o	o	o	o


o: Azt jelzi, hogy a veszélyes anyag tartalom a részegység homogén anyagában a GB/T 26572 szabványban meghatározott érték alatt van


x: Azt jelzi, hogy a veszélyes anyag tartalom a részegység legalább egy homogén anyagában a GB/T 26572 szabványban meghatározott érték felett van.

 Zöld élet	A termék 10 évnyi „zöld élet” élettartammal rendelkezik a gyártó tervei alapján. A „zöld élet” kifejezés csak normál használat esetén, a használati utasításban foglaltak betartásával értelmezhető.
---	--

Akkumulátor

Támogassa az akkumulátor újrahaznosítását (lithium-ion akkumulátor)

 Veszély	<p>A készülék újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne használja más termékben. Ne töltse fel a kiszereelt akkumulátort</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ne dobja tűzbe vagy melegítse fel. • Ne szűrje meg túvel, üsse meg vagy próbálja meg szétszerelni. • Ne okozzon rövidzárlatot fém érintkezéssel. • Ne tárolja nyaklánc vagy hajtú mellett. • Ne töltse, használja vagy helyezze tűz közelébe, ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy egyéb magas hőmérsékletnek. <p>A fentiek melegevést, tüzet vagy robbanást okozhatnak</p>
--	---

 <p>Figyelmeztetés</p>	<p>A kiszerezelt akkumulátort gyermekek által nehezen elérhető helyen tárolja.</p> <ul style="list-style-type: none">• Véletlen lenyelés esetén forduljon azonnal orvoshoz!• Az akkumulátorból szivárgó folyadékot ne érintse meg és az alábbiak szerint kezelje:<ul style="list-style-type: none">○ Ha az akkumulátorból szivárgó folyadék szembe kerül, az vakságot okozhat. Ne érintse meg a szemét közvetlenül a kezével. Mossa meg a szemét vízzel és azonnal forduljon orvoshoz. Ha a folyadék bőrrel vagy ruhával érintkezik, irritációt és sérülést okozhat. Mossa meg vízzel és ha a kellemetlen érzés megmarad, azonnal forduljon orvoshoz.○ Csak selejtezés esetén bontsa meg az akkumulátort, melyet csak szakember végezhet! Ellenkező esetben sérülést, áramütést és tüzet okozhat. Javítási igény esetén forduljon szakszervizhez.
---	---

A készülékben használt lithium-ion akkumulátorok újrahasznosíthatóak és értékes erőforrások. Ha az akkumulátor elhasználódott adja át megfelelő szakértelemmel rendelkező szervezetnek újrahasznosításra.

- Az akkumulátort el kell távolítani a készülék hulladék-kezelése esetén.
- A készüléket áramtalanítani kell az akkumulátor eltávolítása előtt.
- Az akkumulátor elváltolásakor figyeljen a biztonsági előírásokra.